



Maschera con valvola venturi regolabile Silente

Low operating noise



Ossigeno e Aerosol Terapia ▪ Fixed Oxygen Concentration (High Flow)



Maschera Silente con valvola Venturi regolabile

La nuova maschera Silente, mantenendo tutte le migliori caratteristiche del design originale, garantisce migliori prestazioni in caso di flussi elevati e riduce drasticamente i costi

Il nuovo design twin-jet offre all'utente sette concentrazioni di ossigeno. Il diametro del corpo di dimensioni maggiori offre lo spazio per eseguire una taratura chiara, con canpi di taratura adeguatamente spazianti, ed è provvisto di un meccanismo di tipo "pull-twist" che impedisce la regolazione accidentale. Il design in un pezzo unico consente di utilizzare un'unica valvola per tutte le concentrazioni ed elimina il rischio di perdere qualche pezzo.

- Viene selezionata la portata adeguata alla concentrazione di ossigeno desiderata
- l'anello esterno con il suo meccanismo "pull-twist" seleziona la concentrazione di ossigeno prescritta
- sopra ogni concentrazione è stampato il valore di portata in L/min che indica l'impostazione ottimale del flussometro.

Precisione

La maschera Silente eroga concentrazioni di ossigeno precise. Tale precisione è indipendente dall'impostazione del flussometro per l'ossigeno e si ottiene utilizzando un'unica valvola.

Facilità di utilizzo

La maschera con valvola regolabile Venturi Intersurgical è semplice da utilizzare ed offre i seguenti vantaggi e caratteristiche:

Richiesta info

Incurved nose seal

Conforms to different nose shapes designed to prevent oxygen entering patient's eyes

Campi di taratura larghi, adeguatamente distanziati


Facilita la lettura, minimizza gli errori

Design in un pezzo unico

Nessuna parte da sostituire o smarrire

Estremamente silenziosa

Ambiente del paziente notevolmente migliore

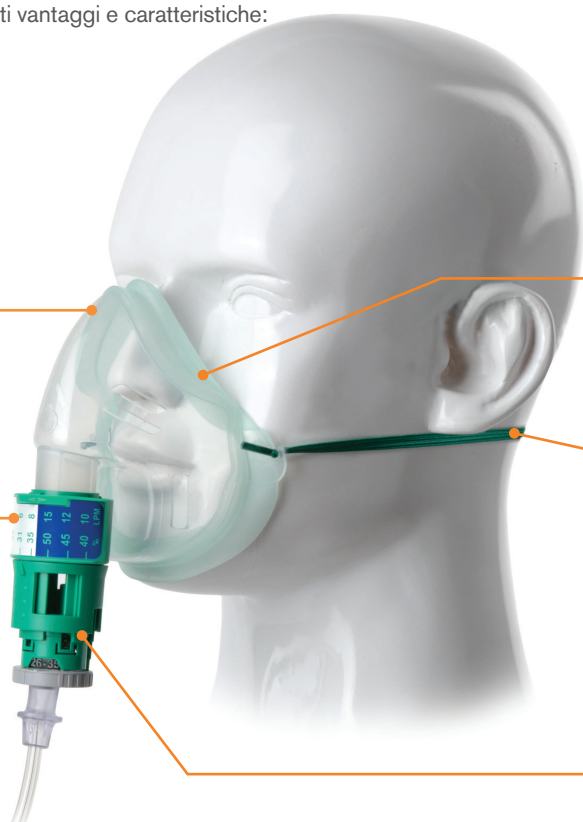

Greener

The elimination of PVC from the masks has dramatically lowered their environmental impact

Soft face seals

Increased patient comfort

Elastic positioned under the ears

Eliminates trauma to top of ears

Comandi di tipo pull-twist

Impediscono la regolazione accidentale

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
1137000	Silente™, kit con maschera Eco adulto con Venturi regolabile, tubo lungh. 1.8m	80
1138015 <i>NUOVO</i>	Silente™, kit con maschera Intersurgical EcoLite™ pediatrica con Venturi regolabile, tubo lungh. 1.8m	40
1188015	Intersurgical Ecolite™, maschera per aerosol, adulto	50
1198015	Intersurgical EcoLite™, maschera per aerosol, pediatrica	42
1139000	Silente™ valvola Venturi regolabile	50

Prodotto a basso impatto ambientale



Intersurgical SpA, Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2003 e ISO 14001:2015

Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente privilegia il fronte/retro.

Il distributore Intersurgical S.p.A. è certificato ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016

IS10.21 • Issue 4 12.18