

Come usare il dispositivo sovraglottideo i-gel®



GESTIONE DELLE VIE AEREE NATURALE

Preparazione



1 Aprire la confezione di **i-gel** su di una superficie piana ed estrarlo insieme al guscio protettivo colorato che lo avvolge.



2 Sganciare **i-gel** dal suo guscio protettivo. Mantenere nel palmo della stessa mano l'i-gel e il guscio protettivo, tenendo l'i-gel tra pollice ed indice.



3 Mettere una piccola dose di lubrificante a base d'acqua al centro del manico del guscio dalla parte concava, per predisporre la lubrificazione del dispositivo.



4 Impugnare **i-gel** all'altezza del bite block integrato con la mano opposta libera e cospargere di un sottile strato di lubrificante le parti anteriore, posteriore e laterali della cuffia.

Tecnica di inserimento




5 Riporre **i-gel** all'interno del guscio protettivo in attesa dell'inserimento.



6 Rimuovere i-gel dal guscio protettivo. Afferrare saldamente **i-gel** lungo il bite block integrato. Posizionare il dispositivo in modo tale che la parte frontale della cuffia sia rivolta verso il mento del paziente. Il paziente deve essere in posizione supina con la testa estesa, leggermente reclinata e il collo flesso. Il mento verrà gentilmente premuto verso il basso prima di procedere. Introdurre la punta soffice dentro alla bocca del paziente in direzione del palato duro.




7 Far scivolare i-gel verso il basso lungo il palato duro con una spinta delicata ma decisa e continua fino a sentire una **definitiva resistenza**.

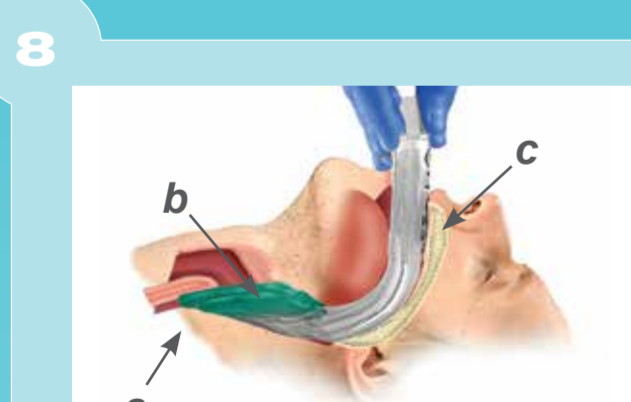

8 La punta del dispositivo deve posizionarsi in modo da sigillare l'apertura superiore dell'esofago (a) e la cuffia deve essere posizionata contro la parete laringea (b). Gli incisivi dovrebbero posizionarsi sul bite block integrato (c).



9 **i-gel** può essere fissato con nastro adesivo "da mascella a mascella".

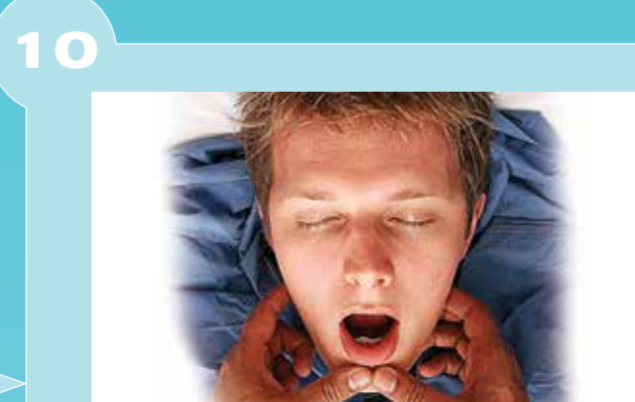

10 In caso di resistenza all'inizio dell'inserimento del dispositivo, spingere con decisione sulla mandibola (sopra) o si raccomanda un inserimento con tecnica "Rotazione profonda" (a destra).



Misura i-gel	Dimensioni paziente	Peso paziente in (kg)
3	Adulto, small	30-60
4	Adulto, medium	50-90
5	Adulto, large e +	90+

Note importanti alla tecnica di inserimento raccomandata

A volte una sensazione di "resistenza" può essere percepita prima di raggiungere il punto di posizionamento finale. Questo può essere causato dal passaggio della cuffia dell'i-gel attraverso i pilastri palatini. E' importante continuare ad inserire il dispositivo fino ad una **resistenza definitiva**.

Una volta che si incontra questa resistenza definitiva e i denti incisivi sono posizionati sul bite block integrato, non spingere i-gel ulteriormente a fondo e non applicare una forza eccessiva nell'inserimento.

Non dovrebbero essere praticati più di tre tentativi sullo stesso paziente.


Non è necessario inserire le dita o i pollici dentro la bocca del paziente durante il processo di inserimento del dispositivo.

visitate

www.i-gel.it

Tel: +39 0535 20836

info@intersurgical.it

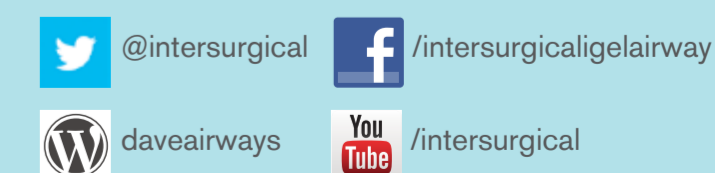

Queste istruzioni non costituiscono una guida esauriente per preparazione, inserimento e utilizzo del dispositivo i-gel. L'utilizzatore deve prima familiarizzare con le istruzioni per l'uso complete prima di qualsiasi tentativo di utilizzo del dispositivo i-gel. Copie delle istruzioni complete sono disponibili contattando Intersurgical S.p.A. or visitando il sito www.i-gel.it

Il dispositivo i-gel deve sempre essere separato dal guscio di protezione prima dell'inserimento. Il guscio protettivo non è un introduttore e non deve mai essere inserito all'interno del cavo orale del paziente.

L'evoluzione della gestione delle vie aeree