


i-gel® dispositivo sovraglottideo - Adulto e Pediatrico

Preparazione Misure adulto

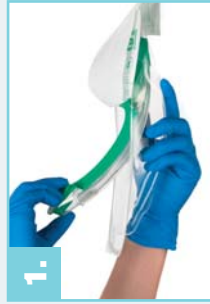

1. Aprire la confezione di i-gel su di una superficie piana ed estrarlo insieme al guscio che lo avvolge.



2. Rimuovere i-gel dal guscio protettivo e trasferirlo nel palmo della mano, la stessa che tiene il guscio, tenendo i-gel tra pollice ed indice.



3. Versare una piccola dose di lubrificante a base d'acqua (per es. K-Y Jelly®) sul guscio al centro del manico nella parte concava, per predisporre la lubrificazione del dispositivo.



4. Afferrare i-gel all'altezza del bite-block integrato con la mano opposta libera e cospargere di un sottile strato di lubrificante le parti anteriore, posteriore e laterali della cuffia.



5. Controllare accuratamente il dispositivo affinché eventuali corpi estranei o eccessi di lubrificante non ostruiscano l'apertura dell'estremità distale. Rimettere i-gel all'interno del guscio protettivo in attesa dell'inserimento.



Vai al punto 6. tecniche di inserimento

Misure Pediatriche



1. Aprire la confezione di i-gel su di una superficie piana ed estrarlo insieme al guscio che lo avvolge.



2. Aprire il guscio protettivo e spostare i-gel sul coperchio dello stesso.



3. Versare una piccola dose di lubrificante a base d'acqua (per es. K-Y Jelly®) sul guscio al centro del manico, nella parte più liscia.



4. Afferrare i-gel all'altezza del bite-block integrato con la mano opposta libera e cospargere di un sottile strato di lubrificante le parti anteriore, posteriore e laterali della cuffia.



5. Controllare accuratamente il dispositivo affinché eventuali corpi estranei o eccessi di lubrificante non ostruiscano l'apertura dell'estremità distale. Rimettere i-gel all'interno del guscio protettivo in attesa dell'inserimento.




Vai al punto 6. tecniche di inserimento

Tecnica di inserimento




6. Rimuovere i-gel precedentemente lubrificato dal guscio protettivo. Afferrarlo saldamente lungo il bite-block integrato. Posizionare il dispositivo in modo che la parte interna colorata della cuffia sia rivolta verso il mento del paziente. Il paziente deve essere in posizione supina con la testa estesa, leggermente reclinata e il collo flesso (sniffing position). Il mento verrà delicatamente premuto verso il basso prima di procedere. Introdurre la punta soffice di i-gel dentro la bocca del paziente in direzione del palato duro.

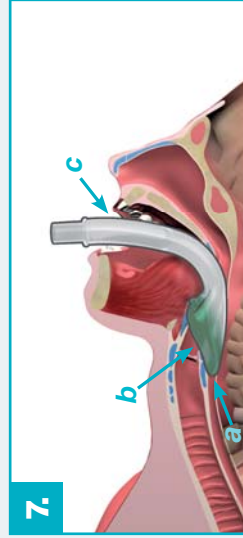

7. Far scivolare il dispositivo verso il basso lungo il palato duro con una spinta gentile e continua fino a sentire una definitiva resistenza.

La punta del dispositivo deve posizionarsi in modo da sigillare l'apertura superiore dell'esofago (a) e la cuffia deve essere posizionata contro la parete laringea (b). Gli incisivi devono posizionarsi sul bite-block (c).

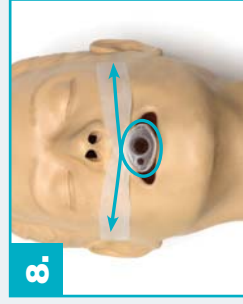

8. i-gel può essere fissato con nastro adesivo "da mascella a mascella"



Dimensioni paziente	Misura i-gel	Peso paziente
Neonatale	1	2-5 kg
Infantile	1.5	5-12 kg
Pediatrico, small	2	10-25 kg
Pediatrico, large	2.5	25-35 kg
Adulto, small	3	30-60 kg
Adulto, medium	4	50-90 kg
Adulto, large	5	90+ kg



Note importanti alla tecnica di inserimento raccomandata

A volte può essere percepita una sensazione di "resistenza" prima di raggiungere il punto di posizionamento finale. Questo può essere causato dal passaggio della cuffia del dispositivo attraverso i plastrati palatini. È importante continuare ad inserire i-gel fino ad una resistenza definitiva. Una volta incontrata questa resistenza definitiva e posizionati i denti incisivi sul bite-block integrato, NON spingere i-gel ulteriormente a fondo e non applicare una forza eccessiva nell'inserimento.

Non è necessario inserire le dita o i pollici dentro la bocca del paziente durante il processo di inserimento del dispositivo.

Visita il sito www.intersurgical.it/info/igel

Questo poster NON costituisce una guida completa a preparazione, inserimento e utilizzo di i-gel. L'utilizzatore deve familiarizzare con le istruzioni per l'uso complete allegate al prodotto, prima di qualsiasi tentativo di utilizzo del dispositivo i-gel. Una User Guide è disponibile contattando Intersurgical o dal sito web www.intersurgical.it/info/igel. **Il dispositivo i-gel deve essere sempre separato dal guscio protettivo prima dell'inserimento. Il guscio non è un introduttore e non deve MAI essere inserito nella bocca del paziente.** K-Y Jelly® è un marchio registrato Johnson and Johnson Inc.



INTERSURGICAL
SISTEMI COMPLETI PER LA RESPIRAZIONE

Intersurgical SpA, Via Torino Morandi, 12
41037 Mandola (MO), Italia
T. +39 0535 20836 F. +39 0535 418234
info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Intersurgical con noi